

Ultraschall Leberchirurgie:

HEPACCS – cutting-edge dissection experience



→ Ultraschall Leberchirurgie: **HEPACCS – cutting-edge dissection experience**

Die HEPACCS Instrumente bieten die neueste Technologie, exzellentes Design und eine Vielzahl von Produktoptionen für die offene und laparoskopische Leberchirurgie.

Mit HEPACCS ist die Dissektion sehr präzise und gewünschte Strukturen bleiben erhalten. Das leichte und gut ausbalancierte HEPACCS Instrument liegt

natürlich in der Hand des Chirurgen und ermöglicht ein einfaches und komfortables Arbeiten. Für aktuelle und zukünftige Anforderungen bietet das HEPACCS Sortiment eine breite Palette an Produktlösungen - von der voll integrierten HF-Koagulationsfunktion bis hin zur laparoskopischen Sonotrode mit einem besonders kleinen Schaftdurchmesser für minimalinvasive Eingriffe.




HEPACCS – cutting-edge dissection experience:

- + *Neueste Technologie - chirurgische Präzision für die Leberresektion*
- + *Einfaches und komfortables Arbeiten - entwickelt für die Hand des Chirurgen*
- + *Umfassendes zukunftsorientiertes Sortiment - für die führende laparoskopische Chirurgie*


Neueste Technologie: chirurgische Präzision für die Leberresektion

Mit HEPACCS ist die Dissektion sehr präzise und gewünschte Strukturen bleiben erhalten.


Das Arbeiten mit HEPACCS fokussiert auf das Wesentliche:

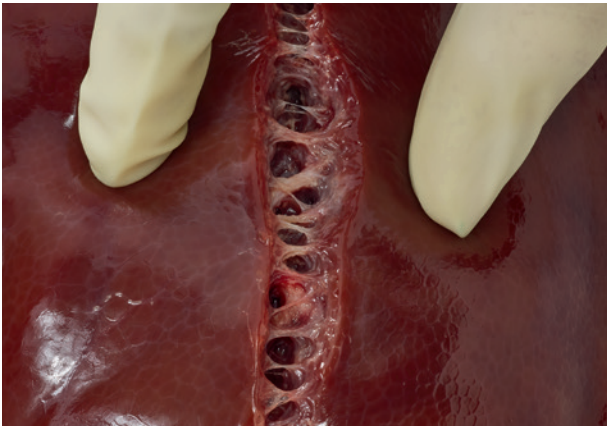


- Erhalt der gewünschten Strukturen

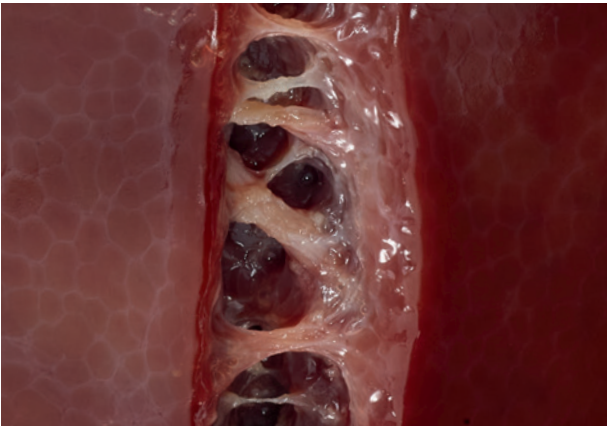

- Präzise Gewebedissektion

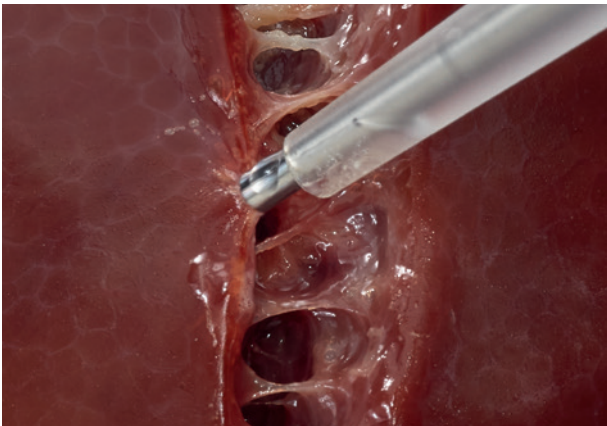

- Minimales Anhaften und Festsaugen am Gewebe

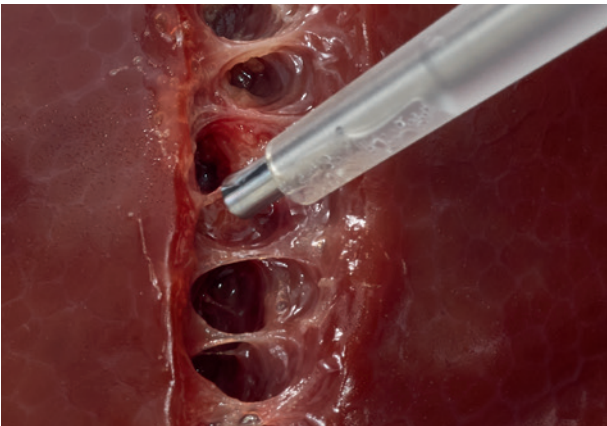

- Exzellente Sicht und minimaler Sprühnebel

HEPACCS umfasst die neueste Technologie:

- Leistungsstarker Ultraschallkonverter
- Präzise gestaltete Sonotrodengeometrien
- Aufeinander abgestimmte Spülung & Absaugung
- Weiterentwickelte Software

Die Bilder oben zeigen exemplarisch Schweineleber, die in einem Laboraufbau präpariert wurde.

Einfaches und komfortables Arbeiten: entwickelt für die Hand des Chirurgen


Das ergonomische HEPACCS Design bietet Komfort in unterschiedlichen chirurgischen Situationen während der Leberresektion.

Komfortables Arbeiten

Das gut ausbalancierte und leichte Instrument unterstützt komfortables Arbeiten.

Unterbrechungsfreier Arbeitsablauf

Die voll integrierte monopolare HF-Koagulationsfunktion ermöglicht einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

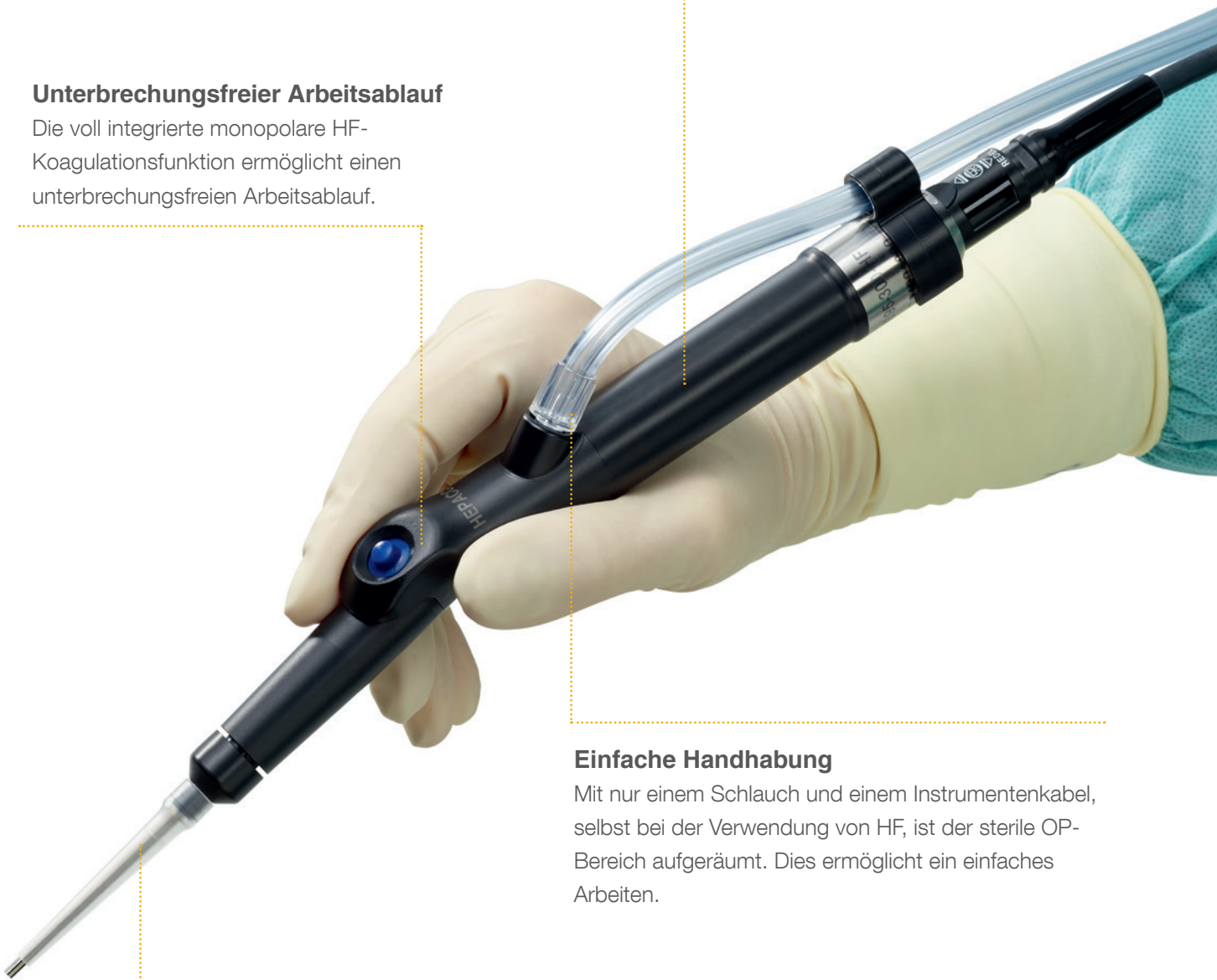

Einfache Handhabung

Mit nur einem Schlauch und einem Instrumentenkabel, selbst bei der Verwendung von HF, ist der sterile OP-Bereich aufgeräumt. Dies ermöglicht ein einfaches Arbeiten.

Sichere & schnelle Sonotrodenmontage

Mit dem HEPACCS Drehmomentschlüssel ist die Sonotrode in kürzester Zeit am Instrument montiert. Ein deutliches Klickgeräusch signalisiert dabei die sichere Verbindung - Click & Start.

Umfassendes zukunftsorientiertes Sortiment: für die führende laparoskopische Chirurgie

Das HEPACCS Instrument für die Laparoskopie ermöglicht minimalinvasive Chirurgie durch einen herausragend kleinen Schaftdurchmesser von 4,95 mm und einer voll integrierten monopolaren HF-Koagulationsfunktion.

HEPACCS Instrument für die Laparoskopie:

- 4,95 mm Schaftdurchmesser – über die gesamte Arbeitslänge
- 2 Energien – Ultraschall und monopolare HF-Koagulation für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf
- 312 mm Arbeitslänge – harmonisiert perfekt mit standardmäßig verwendeten laparoskopischen Instrumenten



Flexibilität durch Modularität

Das umfassende zukunftsorientierte HEPACCS Sortiment bietet mit zwei Instrumenten und drei Sonotroden sechs flexible Instrumentenoptionen für die offene und laparoskopische Chirurgie.

3 Sonotroden

2,2 mm Spitze



3,2 mm Spitze



2,6 mm Spitze



2 Instrumente



6 Optionen - für die offene und laparoskopische Chirurgie

Auf einen Blick: HEPACCS Produktübersicht

HEPACCS Instrument

Artikel-Nr. 95-300



HEPACCS Instrument mit HF

Artikel-Nr. 95-300-HF



HEPACCS Instrumenten-Tray

Artikel-Nr. 616K0200



HEPACCS Drehmomentschlüssel

Artikel-Nr. 616K0009



HEPACCS Kombischlauch

Artikel-Nr. 700S0318-10



Lieferung | Aufbereitung steril | Einmalprodukt

HEPACCS Sonotrode und Cover

Artikel-Nr.	617K0914	617K0922
Arbeitslänge der Sonotrode	48 mm	41 mm
Außen Ø Innen Ø der Sonotroden	2,2 mm 1,4 mm	3,2 mm 2,2 mm
Lieferung Aufbereitung	steril Einmalprodukt	steril Einmalprodukt



HEPACCS Sonotrode und Cover, lap.

Artikel-Nr.	617K0930
Arbeitslänge der Sonotrode	312 mm
Außen Ø Innen Ø der Sonotroden	2,6 mm 1,7 mm
Lieferung Aufbereitung	steril Einmalprodukt



Der Ultraschall-Generator SONOCA 300

Der SONOCA 300 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einfache Bedienung aus.

Die Vorteile in Kürze:

- Integrierte Spül- und Absaugfunktion
- Schnelles Set-up mit automatischem Selbsttest
- Voreinstellung der Leistungsparameter
- Einfache Bedienung



Vertrauen Sie auf: **über 35 Jahre führende Innovation**

Die Söring GmbH wurde 1985 von Holger Söring mit Hauptsitz in Quickborn gegründet und stellt seitdem qualitativ hochwertige Produkte für die Ultraschall-Chirurgie her. Das Unternehmen steht für führende Ultraschalltechnologie mit zahlreichen etablierten Anwendungen in der Leberchirurgie, Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie sowie für das Wunddebridement. Bei Söring ist alles „Made in Germany“: von der Entwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb. Die breite Produktpalette wird stets in enger Zusammenarbeit mit führenden Anwendern optimiert und erweitert. Denn Kundenzufriedenheit steht bei Söring an erster Stelle. Nicht zuletzt deshalb bietet das Unternehmen ein umfassendes Instandhaltungs- und Serviceprogramm.

Söring

Firmensitz
Quickborn



Vertriebspartner

Söring und seine Vertriebspartner operieren weltweit in über 90 Ländern.

→ Söring GmbH

Justus-von-Liebig-Ring 2
25451 Quickborn
Tel.: +49 4106-6100-0
E-Mail: info@soering.com

Weitere Informationen unter: www.soering.de



Folgen Sie uns auf **LinkedIn**

